





Kvikguide til Clover 10 transportabelt forstørrelsesapparat

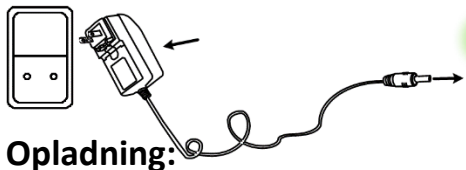

Opladning:


Sæt lysnet-adapterens ledning i det lille runde hul i højre side af Clover 10, og sæt selve adapteren i en stik-kontakt. Husk at tænde for strømmen på kontakten.

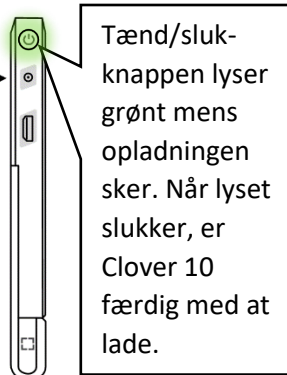

Tænd/sluk-knappen lyser grønt mens opladningen sker. Når lyset slukker, er Clover 10 færdig med at lade.

Tænd:

Tryk på tænd/sluk-knappen **og hold den inde** i ca. 5 sekunder. Derefter skal man vente lidt, til apparatet er klar til brug.

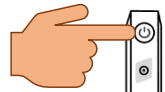

Sluk:

Tryk på tænd/sluk-knappen **og hold den inde** i ca. 5 sekunder.




Juster forstørrelse:

Tryk på knappen med **minus-tegn** for at få **mindre** forstørrelse (rød pil på tegningen til højre).

Tryk på knappen med **plus-tegn** for at få **større** forstørrelse (grøn pil på tegningen til højre).

Når billedet på skærmen er forstørret, kan man flytte rundt i det ved at skubbe den orange knap mellem plus- og minus-knapperne fremad, tilbage og til højre og venstre

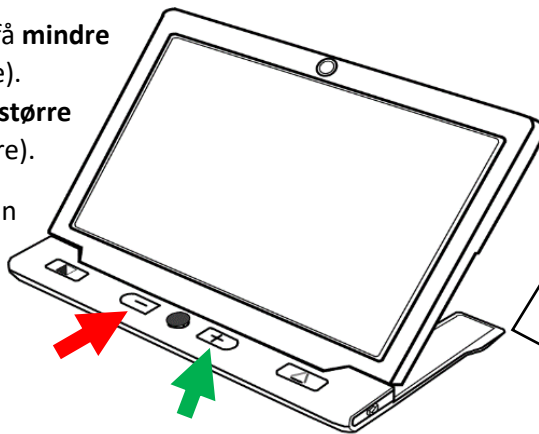


Støttefod:

Clover 10 har en støttefod, der kan foldes ud og ind: Når den er foldet ud, kan Clover 10 stå på f.eks. en avisside, uden at man selv skal holde apparatet hele tiden

Farver med stærk kontrast:

Tryk en eller flere gange på knappen nederst til venstre på Clover 10's forside for at få stærk kontrast på tekst, og vælge mellem forskellige farvekombinationer.

Tryk på knappen nederst til højre på Clover 10's forside for at få vist billedet på skærmen i naturlige farver (fravælger de specielle farver med stærk kontrast)

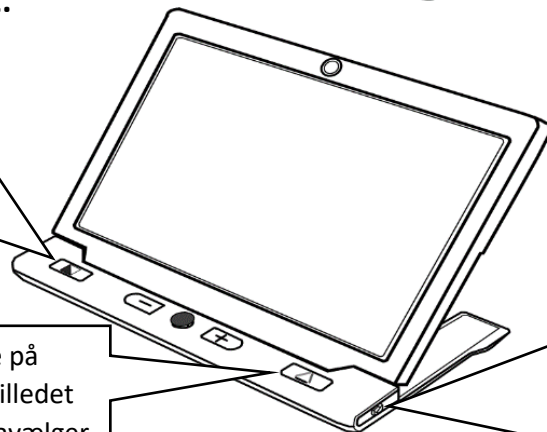

Fast-"frys" billedet:

Ved at trykke på denne knap kan man "fastfryse" det der er på skærmen, selv om man bagefter flytter apparatet. Tryk på knappen igen for at "ophæve" denne fastfrysning, så billedet bliver "levende" igen.

Bemærk at Deres Clover 10 også kan en masse andre ting, som ikke er vist her. De er alle sammen beskrevet i detaljer i den komplette vejledning til Clover 10.