



Vejledning til

MySpeak talende ur

”Klokken er
elleve
fjorten om
aftenen”



Indholdsfortegnelse

Introduktion	1
Sikkerhed og vedligeholdelse	1
Rundt om MySpeak talende ur	2
Højtlæsning af klokkeslæt.....	2
Sådan stilles uret	2
Indstilling af viseruret	2
Indstilling af det højtlyste klokkeslæt.....	3
Valg mellem "analog" og "digital" talemåde.....	3
Tænde og slukke for talefunktionen	4
Tilpasse lydstyrken	4

Introduktion

Tillykke med – og tak for – anskaffelsen af Deres MySpeak talende ur. For at få det fulde udbytte, anbefales De at læse denne vejledning helt igennem

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Bemærk at uret **ikke** er vandtæt. De bør derfor tage det af, når De vasker hænder, tager bad, vasker op, eller andre aktiviteter der involverer vand eller andre væsker.
- Uret drives af et batteri af typen CR2025. Hvor længe uret fungerer på et batteri afhænger af Deres brugsmønster, især af hvor ofte De bruger "højtlæsnings"-funktionen. Vi anbefaler kraftigt at De indleverer uret til Lys og lup (vores kontaktoplysninger står nederst på forsiden af denne vejledning), når det trænger til et nyt batteri. Alternativt kan De henvende Dem hos Deres lokale urmager. Bemærk dog, at **fabriksgarantien bortfalder**, hvis uret holder op med at fungere efter batteriskift foretaget af andre end leverandøren!

Rundt om MySpeak talende ur

I det følgende anføres MySpeak-urets forskellige knapper, alle med et nummer. Når denne vejledning nævner en af knapperne, henvises til numrene i denne oversigt:

1. Tale-knap: Tryk her for at få det aktuelle klokkeslæt "læst højt".
2. Krone, som indstiller det klokkeslæt der vises på urskiven.
3. Knap til justering af minuttal samt lydstyrken.
4. Knap til justering af timetal.

Bemærk at knapperne 3 og 4 er "flade", så de flugter med urets yderside. Der skal bruges en spids genstand, f.eks. en tegnestift eller en bøjet papirclip, til at trykke på disse knapper.



Højtlæsning af klokkeslæt

Tryk på taleknappen (nr. 1 i oversigten ovenfor): Nu høres en stemme der siger hvad klokken er, f.eks. "Klokken er fjorten minutter over elleve om formiddagen".

Sådan stilles uret

Bemærk at uret indeholder to urværker, som fungerer uafhængigt af hinanden, og derfor skal indstilles hver for sig: Det ene urværk driver viserne på urskiven, mens det andet holder styr på det tidspunkt, som højtlæsnings-funktionen fortæller.

Indstilling af viseruret

Klokkeslættet på urskiven indstilles på samme måde som traditionelle armbåndsure: Træk kronen (nr. 3 i oversigten ovenfor) et par millimeter ud, og drej på den, indtil viserne på skiven viser det aktuelle klokkeslæt. Tryk derefter kronen ind på plads igen.

Indstilling af det højtlyste klokkeslæt

For at indstille det urværk, der leverer det "højtlyste" klokkeslæt, skal De bruge en spids genstand til at betjene de "flade" knapper, som sidder langs urets kant ud for "4" og "8" på urskiven (nr. 3 og 4 i oversigten på forrige side).

- Tryk på knappen ud for "4" på urskiven (nr. 3 i oversigten på forrige side) for at indstille minuttallet: Hver gang De trykker, øges minuttallet med ét, og stemmen siger for hvert tryk hvilket minuttal uret er indstillet til. Tryk så mange gange der skal til, før stemmen siger det rigtige minuttal.
- Tryk på knappen ud for "8" på urskiven (nr. 4 i oversigten på forrige side) for at indstille timetallet. For hver gang De trykker, øges timetallet med én, og stemmen siger for hvert tryk, hvilket timetal uret er stillet til. Tryk så mange gange der skal til, før stemmen siger det rigtige timetal.

Valg mellem "analog" og "digital" talemåde

Man kan sige et klokkeslæt på to måder, f.eks. "elleve fjorten", som man læser på et digitalur, eller den mere traditionelle facon, f.eks. "fjorten minutter over elleve". Deres talende ur kan indstilles til den "talemåde" De foretrækker.

Når De indstiller højtlysnings-funktionens timetal som beskrevet ovenfor, skifter uret mellem de to talemåder hver gang timetallet justeres forbi klokken 12 midnat (eller "klokken nul").

- Når den "digitale" talemåde er valgt, siger uret blot timetallet som et enkelt tal, f.eks. "Tolv, tretten, fjorten" osv.
- Når den "analoge"/traditionelle talemåde er valgt, udtales timetallet som f.eks. "To om natten", "ti om formiddagen", "fire om eftermiddagen" (bemærk angivelserne af "natten", "formiddagen", "eftermiddagen" osv.)

Tænde og slukke for talefunktionen

Det er muligt at tænde og slukke for den funktion, der læser klokkeslættet højt. Dette kan være praktisk hvis De skal til koncert, foredrag eller lignende, og af og til trykker taleknappen ind utilsigtet.

For at gøre dette, skal De trykke taleknappen (nr. 1 i oversigten på forrige side) ind, og **holde den inde** i cirka 10 sekunder: Så høres tre hurtige biplyde. Herefter siger uret ikke noget, selv om De trykker på taleknappen.

For at tænde for højt-læsnings-funktionen igen, skal De trykke tale-knappen ind, og **holde den inde**, indtil uret siger det aktuelle klokkeslæt. Herefter vil uret igen læse klokkeslættet højt, når De trykker på tale-knappen.

Tilpasse lydstyrken

Den lydstyrke hvormed klokkeslættet "læses højt" kan stilles til to niveauer. For at gøre dette, skal De bruge en spids genstand til at betjene den "flade" knap ud for 4-tallet på urskiven (nr. 3 i oversigten på side 2). Tryk knappen ind, og **hold den inde**, indtil uret siger to hurtige biplyde. Tryk nu på tale-knappen (nr. 1 i oversigten på side 2) et par gange; hver gang De trykker på taleknappen, skifter uret mellem høj og lav lydstyrke, når det siger klokkeslættet. Når den ønskede lydstyrke er valgt, så vent i cirka 5 sekunder, hvorefter uret siger et enkelt "bip"; herefter er den valgte lydstyrke indstillet.