




## Kvikguide til **Snow 12**

Slut oplader-  
kabel til her

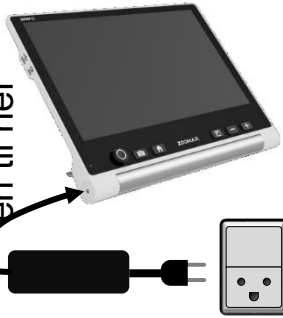

Tænd-/sluk-  
knap:

Tryk kortvarigt for at tænde.  
Tryk kortvarigt for at gå i stand-  
by-tilstand  
Tryk og hold i ca. 5 sekunder for  
at slukke helt.

Styre-  
pind




Fastfrys  
billede

Indstillinger

Stærk  
kontrast

Mindre  
Større  
forstørrelse



Tryk på den lille knap på  
bagsiden for at folde støtte-  
benene ud:

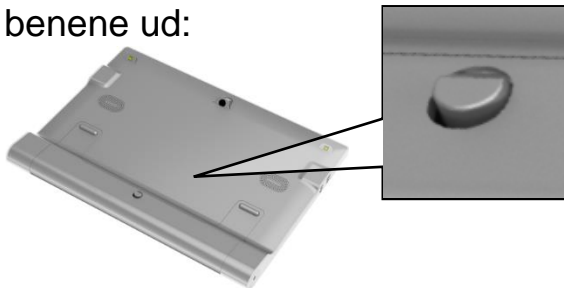
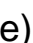








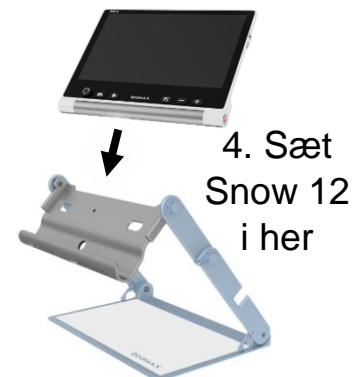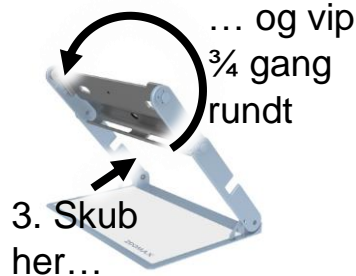






Støttebenene foldes ind  
ved at trykke dem  
tilbage på plads:



Bruge læsestativet:



For at...	skal man gøre følgende...
Justere forstørrelsen	Tryk på knapperne  (for større billede) eller  (for mindre billede)
Se de dele af et forstørret billede, der ligger udenfor skærmen	Skub styrepinden yderst til venstre på apparatets forside op, ned, til højre og venstre.
Benytte kontrastforstærkning	Tryk kortvarigt én eller flere gange på knappen  , til den ønskede farvekombination vises
Tilpasse kontrastforstærkning, så teksten står tydeligt	Tryk og hold knappen  trykket ind, mens der trykkes på  eller  , indtil teksten står tydeligt.
Stoppe brug af kontrastforstærkning, og få naturlige farver vist igen	Tryk og hold på knappen  i ca. 1 sekund
Fastfrys billedet på skærmen	Tryk kortvarigt på knappen 
Gem det "fastfrosne" billede	Berør symbolet  på skærmen, så en liste af valgmuligheder foldes ud. Tryk derefter på symbolet 
Til- og fravælg ledelinje og afblændings-"gardiner"	Tryk samtidigt på knapperne  og  én eller flere gange, indtil ønskede linje/afblænding vises
Brug af hovedmenuen i Snow 12	Tryk på  for at vise hovedmenuen. Herefter kan man vælge mellem de viste emner, enten ved at berøre dem med fingeren direkte på skærmen, eller "navigere" mellem dem ved at bruge styrepinden til venstre på forsiden af Snow 12. Tryk på  for at bekræfte et valg. Tryk på  for at fortryde et valg og gå tilbage til forrige menu/oversigt.

Husk: Snow 12 kan meget mere end det, der er beskrevet her. Referer til den komplette vejledning for at se detaljerne om alt det andet, apparatet kan.