



Vejledning til den elektroniske lup

Luna 6



Indholdsfortegnelse

Introduktion	2
Sikkerheds- og vedligeholdelsesforskrifter	3
Indholdet i æsken.....	3
Rundt om Luna 6	4
Klargøring af lysnetadapteren og den trådløse oplader	5
Opladning.....	6
Tænde og slukke for Luna 6.....	7
Håndtag og støtteben	8
Justere forstørrelsen	9
Kontrastforstærkning.....	10
Fastfrysning af billedet	11
Panorering i et "fastfrosset" billede	12
Gemme et "fastfrosset" billede.....	12
Ledelinjer og afblændingsgardiner	13
Galleri og indstillinger	14
Billedgalleri	16
Tænde og slukke for læse-lys	17
Tænde og slukke for bip-lyde	18
Justere skærmens lysstyrke.....	18
Justering af kontrastforstærkning	19
Tilpasning af farvekombinationer ved kontrastforstærkning	20
Ledelinjer og afblændingsgardiner	21
Tekniske indstillinger.....	23
Kameraets arbejdshastighed og afhjælpning af "flimmer" på skærmen	25
Vælge automatisk sluk til eller fra	26
Information om firmware-version.....	27
Nulstilling til fabriksindstillinger	28

Firmware-opdatering	29
Tilslutning til ekstern skærm eller tv-apparat.....	29
Tilslutning til en Windows-computer	31
Afhjælpning af fejl og problemer.....	32
Sort skærm.....	32
Skærmen viser et mørkt, uskarpt eller forvrænget billede	32
Luna 6 er sluttet til et tv eller anden ekstern skærm, men tv'et/skærmen viser intet billede	32
Efter at have foretaget nogle indstillinger, synes Luna 6 at "opføre" sig mærkeligt ...	33
Luna 6 er tændt, men reagerer ikke (eller reagerer unormalt) når man betjener den	33
Ingen af ovenstående forslag hjalp – hvad gør man så?	33
Tekniske specifikationer	34

Introduktion

Tillykke med anskaffelsen af Deres Luna 6 elektroniske lup. De anbefales at læse denne vejledning igennem for at få det fulde udbytte af Luna 6. Alternativt kan De læse frem til og med side 9 for at lære de grundlæggende funktioner at kende, og derefter bruge "resten" af vejledning som opslagsværk, når De får brug for en bestemt funktion.

Når De skal lære apparatet at kende, så hold Dem ikke tilbage for at prøve Dem frem og eksperimentere med at trykke på knapperne: **De kan ikke "ødelægge" Luna 6 alene ved at trykke på dens knapper** – allerhøjest kan det få apparatet til at opføre sig mærkeligt. Hvis det sker, kan De bringe alle indstillinger mv. tilbage til hvad de var fra fabrikken – mere herom på side 28.

Sikkerheds- og vedligeholdelsesforskrifter

- Undgå at udsætte Luna 6 for ekstrem varme og direkte sollys. Luna 6 bør kun anvendes ved temperaturer fra 10 til 40 grader celsius.
- Luna 6 er ikke vandtæt. Undgå at spilde væsker på den, da elektronikken i den derved kan tage skade.
- Undlad at skille Luna 6 ad. Hvis der er behov for reparation, bedes De henvende Dem til Lys og lup – vores kontaktoplysninger står nederst på forsiden.
- Brug en tør eller **let** fugtig klud til rengøring. Brug ikke stærke eller skurende rengøringsmidler, da dette kan beskadige overfladerne på Luna 6.

Bemærk: Det anbefales kraftigt, at De lader det indbyggede batteri i Luna 6 helt op før De tager apparatet i brug. På side 5 og frem kan De se hvordan den medfølgende lysnet-adapter og tilhørende trådløse oplader gøres klar til brug, og hvordan De lader Luna 6 op.

Indholdet i æsken

Deres Luna 6 leveres sammen med forskelligt tilbehør som vist på illustrationen herunder. Der skal være:

- A. Luna 6 elektronisk lup
- B. Pudseklud
- C. Kabel til opladning, af typen USB-C
- D. Lysnetadapter til opladning
- E. Kontakt-indsats til lysnetadapteren
- F. Fabrikantens vejledning (er på engelsk)
- G. Etui til opbevaring og transport af Luna 6
- H. Trådløs oplader
- I. HDMI-kabel til at forbinde Luna 6 med en ekstern skærm



Rundt om Luna 6

I det følgende gives en oversigt over de knapper, stik osv. der findes rundt omkring på Luna 6:

På apparatets forside findes:

1. Billedskærm, 5½ tommer
2. Hjem-knap
3. Knap til valg af kontrastforstærkning
4. Indikatorlys
5. Knap der øger forstørrelsen
6. Knap der mindsker forstørrelsen
7. Knap til "fastfrysning" af billedet


Langs apparatets øverste kant findes:

8. Stik til opladning samt overførsel af billeder til/fra en computer
9. Stik til tilslutning til en ekstern billedskærm
10. Tænd/sluk-knap

På apparatets bagside findes:

11. Lys til læsning (2 stk.)
12. Kamera
13. Håndtag
14. Støttefod

På forsiden:

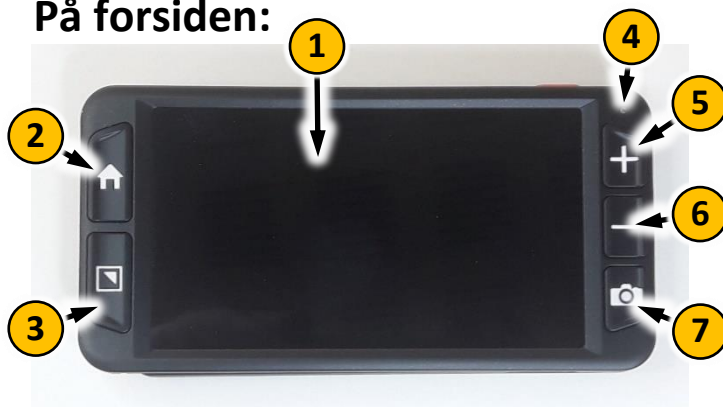

Langs den øverste kant:



På bagsiden:





I denne vejledning henvises til de nummererede detaljer på denne oversigt.

Klargøring af lysnetadapteren og den trådløse oplader

Lysnet-adapteren til opladning ("D" i oversigten på side 3) leveres med et separat sæt stikben ("E" i oversigten). Hold stikbenene og adapteren som vist på det øverste af billederne til højre, og skub den runde studs på stikbenene ind i det runde hul på adapteren som vist på billede 2. Drej herefter stikbenene en kvart omdrejning (90°) med uret, så de låses fast (vist på billede 3).

USB-C-kablet (mærket "C" i oversigten på side 3) har et stik i hver ende, hvoraf det ene er større end det andet: Sæt det største af disse stik i det firkantede hul i lysnet-adapteren; dette findes modsat den ende hvor stikbenene blev sat på. Stikket passer kun én vej i stikket – brug ikke magt når De sætter det i.

Sæt derefter lysnet-adapteren i en ledig stikkontakt, og husk at tænde for strømmen på stikkontakten. Sørg for at De har den frie ende af kablet (med det mindste af de to stik) indenfor rækkevidde.

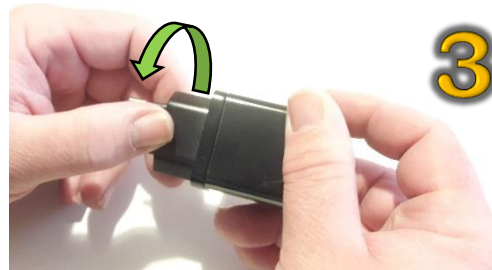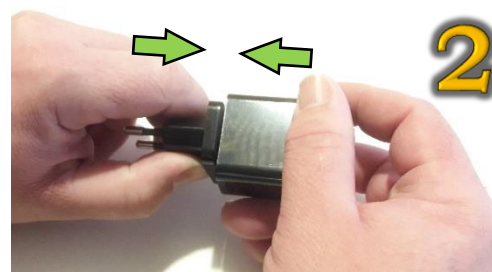



Luna 6 kan oplades på to forskellige måder; enten ved at forbinde USB-C-kablet direkte til Luna 6, eller ved hjælp af den medfølgende trådløse oplader (mærket "H" i oversigten på side 3). Ønsker De at benytte den sidstnævnte metode, skal De sætte det lille stik i USB-C-kablets frie ende i hullet i kanten på den trådløse oplader som vist på illustrationen herunder. Placer derefter den trådløse oplader på f.eks. et bord, hvor den er nem at komme til.

Opladning

Luna 6 har et indbygget, opladeligt batteri, der som tidligere nævnt kan oplades på to forskellige måder; enten ved at slutte apparatet direkte til lysnet-adapteren, eller ved brug af den trådløse oplader.

For at benytte den førstnævnte metode, skal De klargøre lysnet-adapteren som beskrevet ovenfor, og dernæst sætte det lille stik i USB-C-kablets frie ende i stikhullet til opladning, som findes til venstre langs apparatets øverste kant (nr. 8 på oversigten på side 4).

Har De klargjort den trådløse oplader som beskrevet ovenfor, skal De blot lægge Luna 6 på plads på opladeren som illustreret herunder:

Dette lille fremspring skal passe ind i **denne udskæring.**

Luna 6 korrekt anbragt på den trådløse oplader:



Dette håndtag skal passe ind i **denne brede fure.**





Når Luna 6 er korrekt placeret på den trådløse oplader, ser det hele ud som på billedet til højre.

Øverst til højre på apparatets forside findes et lille indikatorlys (nr. 4 i oversigten på side 4): Mens opladningen sker, lyser dette rødt. Når Luna 6 er ladet helt op, slukker det røde lys – dette kan tage op til knap 3 timer hvis De har sluttet Luna 6 direkte til lysnet-adapteren, og op til ca. 4 timer hvis De bruger den trådløse oplader. Efter en komplet opladning rækker batteriet til godt 4 timers brug, før det igen er nødvendigt at lade det op.

Tænde og slukke for Luna 6

Luna 6 tændes og slukkes ved hjælp af den røde knap til højre på apparatets overkant (nr. 10 i oversigten på side 4): Tryk knappen ind, og **hold den inde** i cirka 2 sekunder. Der lyder et lille "bip", og når apparatet er tændt, viser det lille indikatorlys øverst til højre på forsiden (nr. 4 i oversigten på side 4) grønt – herefter går der yderligere nogle sekunder, indtil der vises et billede på skærmen.

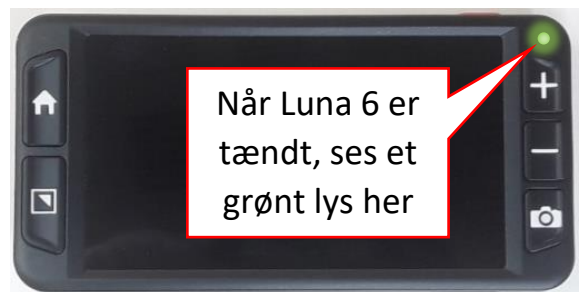

De første sekunder efter at billedet vises på skærmen, vil der i nederste, venstre hjørne ses et symbol der forestiller et batteri:  Inden i batteriet ses nogle pletter, hvis antal (op til tre stk.) antyder hvor meget strøm der er tilbage på batteriet. De kan også kalde symbolet frem for at kontrollere hvor meget strøm der er tilbage, ved at give den røde tænd/sluk-knap et kortvarigt tryk.

Luna 6 slukkes på samme måde som når man tænder for apparatet: Tryk den røde tænd/sluk-knap på overkanten ind, og **hold den inde** i cirka 2 sekunder.

Bemærk at Luna 6 fra fabrikkens side er indstillet til at slukke automatisk for at spare på strømmen i batteriet, hvis den efterlades tændt og ikke bruges i tre minutter. Hvis De ønsker det, kan dette ændres, så apparatet forbliver tændt, indtil De selv slukker for det som beskrevet ovenfor – mere herom på side 26.

Hvis batteriet løber tør for strøm, vil skærmen i nogle sekunder vise et batterisymbol med teksten "Low battery", hvorefter apparatet slukker af sig selv. I den situation er det nødvendigt at lade apparatet op, før der kan tændes igen.

Håndtag og støtteben

På bagsiden af Luna 6 findes et håndtag; det er det "frem-spring" der er markeret med en rød, stiplede linje på det øverste billede til højre. Dette håndtag kan drejes 180 grader rundt, så det stikker ud til venstre som vist på det nederste billede til højre. Når håndtaget er foldet ud på denne måde, kan man holde Luna 6 på samme måde som man ville holde om en traditionel lup, som det er vist på billedet herunder til venstre.



Håndtag



Bemærk at håndtagets stilling påvirker den måde, kameraet fungerer på: Når håndtaget er foldet sammen, er kameraet indstillet til at fokusere ("stiller skarpt") på kort afstand, f.eks. til læsning, mens det fokuserer på længere afstand når håndtaget er foldet ud. Dertil ændres kameraets vinkel, afhængigt af om håndtaget er foldet ind eller ud.

På ydersiden af håndtaget findes et par grå støtteben (markeret med rødt, stiplet omrids på billedet til venstre herunder): Disse kan vippes ud som illustreret på det midterste billede. Når støttebenene er foldet ud på denne måde, kan man stille Luna 6 på skrå oven på læsestof mv. som vist på billedet til højre; det får skærmen til at stå i en behagelig og ergonomisk optimal vinkel, når man f.eks. læser avis med sin Luna 6.



Justere forstørrelsen

Til højre for skærmen findes to knapper mærket plus og minus (hhv. nr. 5 og 6 i oversigten på side 4): når man trykker på knappen med plus-tegnet øges forstørrelsen en lille smule, og tilsvarende vil et tryk på knappen med minus-tegnet mindske forstørrelsen lidt. De kan også trykke på en af disse knapper og **holde den inde** for hurtigt at justere forstørrelsen op eller ned.



Hvis De forsøger at øge forstørrelsen mens Luna 6 allerede er sat til maksimal forstørrelse, eller mindske forstørrelsen mens forstørrelsen i forvejen er sat til minimum, vil De høre en lille bip-lyd.

Bemærk: Hvis De finder bip-lydene generende, kan de slås fra – mere herom på side 18.

Kontrastforstærkning

Billedet på Luna 6's skærm vil normalt vise ting i deres naturlige farver, men der er mulighed for at få forstærket kontrasten, hvilket især kan være en hjælp når man bruger apparatet til læsning.

Denne facilitet vælges ved at trykke på knappen til kontrastforstærkning (nr. 3 i oversigten på side 4), som sidder nederst til venstre for skærmen. Første gang De trykker på knappen, vises teksten helt hvid på en helt sort baggrund. Næste tryk giver helt sort tekst på hvid bund, derefter gul tekst på sort bund. Oversigten til venstre viser de tilgængelige farvekombinationer i den rækkefølge de optræder i, når De trykker på kontrastforstærknings-knappen. Når apparatet er stillet til gul tekst på blå bund (den sidste kombination i rækken), vil næste tryk på knappen bringe de naturlige farver tilbage.

Naturlige farver
Hvid tekst på sort bund
Sort tekst på hvid bund
Gul tekst på sort bund
Sort tekst på gul bund
Hvid tekst på blå bund
Blå tekst på hvid bund
Grøn tekst på sort bund
Sort tekst på grøn bund
Blå tekst på gul bund
Gul tekst på blå bund



Uanset hvilken farvekombination der aktuelt er valgt, er der en praktisk "genvej" tilbage til de naturlige farver: Tryk kontrastforstærknings-knappen ind, og **hold den inde** i cirka 2 sekunder – det er oftest nemmere end at trykke talrige gange for at "bladre igennem" alle farvekombinationerne, indtil man kommer tilbage til de naturlige farver.

De vil formodentlig erfare, at visse af de tilgængelige farvekombinationer er en god hjælp, mens andre ikke gavner så meget. De kan begrænse "sortimentet" af farvekombinationer til dem De har gavn af, så De ikke skal trykke så mange gange på knappen for at finde den kombination De ønsker – mere herom på side 20).

I visse situationer, navnlig når der er ringe kontrast mellem tekst og baggrund på det man prøver at læse, kan man komme ud for at teksten slet ikke ses på skærmen. Det problem kan løses ved at indstille kontrastforstærknings-funktionen: Tryk kontrastforstærkningsknappen ind, og **hold den inde**, mens De trykker en eller flere gange efter tur på knapperne der øger og mindsker forstørrelsen (dem med plus- og minus-tegnene til højre for skærmen; nr. 5 og 6 i oversigten på side 4), indtil teksten står tilfredsstillende klart på skærmen.

Denne indstilling kan også foretages via oversigten over indstillinger – mere herom på side 19.

Fastfrysning af billedet



Luna 6 har en særlig funktion, som kan fastholde et billede, selv når De fjerner apparatet fra motivet. Dette er især nyttigt når man f.eks. er ude og handle, og vil se prisen på et skilt på en af de nederste hylder i butikken. Hold apparatet foran prisskiltet, og tryk på fastfrysningknappen nederst til højre på forsiden (nr. 7 i oversigten på side 4) – nu bliver billedet stående på skærmen, så De kan bringe luppen tæt på ansigtet og se prisskiltet.

Tryk for at
"fastfryse"
billedet

Mens billedet er "fastfrosset" på denne måde, kan De øge forstørrelsen og vælge kontrastforstærkning til og fra som omtalt ovenfor. Dog er det ikke muligt at vælge naturlige farver ved at trykke og holde på farvetilstands-knappen; her er De nødt til at "bladere" frem til de naturlige farver.

Når De ikke længere har brug for at fastfryse billedet på denne måde, kan De få det almindelige, "levende" billede tilbage ved at trykke på fastfrysning-knappen igen.

Panorering i et "fastfrosset" billede

Hvis De fast-"fryser" et billede, og derefter forøger forstørrelsen, så kan hele det "fastfrosne" billede i sagens natur ikke ses på skærmen samtidigt. I stedet er der mulighed for at *panorere* i billedet, dvs. flytte det udsnit af det forstørrede billede, der vises på skærmen. Dette gøres ved at trykke hjem-knappen (nr. 2 i oversigten på side 4) ind, samtidig med at De trykker på:

- fastfrysings-knappen (nr. 7 i oversigten på side 4) for at se længere oppe ad det forstørrede billede,
- farvetilstands-knappen (nr. 3) for at se længere nede ad det forstørrede billede,
- knappen til mindre forstørrelse (nr. 6) for at se længere til venstre på det forstørrede billede, eller
- knappen til større forstørrelse (nr. 5) for at se længere til højre på det forstørrede billede.

Mens De holder hjem-knappen inde for at panorere på denne måde, vises nogle pilesymboler i skærmens venstre og højre kant ud for de forskellige knapper, som minder Dem om hvilke knapper der panorerer i hvilken retning. Slip hjem-knappen igen, når De er færdig med at panorere i billedet.

Gemme et "fastfrosset" billede

"Fastfrosne" billeder kan gemmes til senere brug: Dette er et fremragende redskab til at "notere" f.eks. telefonnumre, adresser etc.

Start med at bruge fastfrysings-knappen (nr. 7 i oversigten på side 4) til at "fastfryse" billedet af det, De vil gemme til senere brug. For at gemme det fastfrosne billede i Luna 6's indbyggede billedgalleri, skal De trykke samtidigt på fastfrysings-knappen og på knappen til forøgelse af forstørrelsen (den med plus-tegnet; nr. 5 i oversigten på side 4). Når De gør dette, viser skærmen kortvarigt det "fluebensymbol" der er vist til højre. Viser skærmen i stedet teksten "Memory is full", er billedet ikke blevet gemt, fordi "lagerkapaciteten" i billedgalleriet allerede er fuldt udnyttet.



På side 16 kan De læse mere om billedgalleriet, hvor De kan gense og administrere gemte billeder. Hvis De har en computer med Windows-operativsystemet, kan De også overføre billederne til computeren – mere herom på side 31.

Ledelinjer og afblændingsgardiner





Luna 6 har nogle hjælperedskaber som kan gavne, hvis man har svært ved at få øjnene til at blive på en tekstlinje når man læser; en ledelinje man kan lægge op imod en linje tekst omtrent som med en lineal, og nogle "gardiner" som afblænder alt andet end en smal stribe, så man kun ser én tekstlinje eller kolonne ad gangen.

For at aktivere disse, skal De trykke **samtidigt** på de to knapper til indstilling af forstørrelsen til højre for skærmen (nr. 5 og 6 i oversigten på side 4), én eller flere gange:

- Første gang De trykker på begge forstørrelses-knapper, vises en vandret rød linje (illustreret øverst til højre).
- Anden gang De trykker, ses en lodret linje (næstøverste illustration til højre).
- Tredje gang De trykker, ses to sorte "afblændingsgardiner", så man kun kan se en smal, vandret stribe af billedet (tredje illustration til højre).
- Fjerde gang De trykker, vil der være to "afblændingsgardiner", som lader Dem se en lodret stribe af billedet (fjerde illustration til højre)
- Femte gang De trykker, vender billedet tilbage til den normale visning uden hverken ledelinjer eller "gardiner".

Bemærk at til- og fravalgt af ledelinjer og afblændingsgardiner også kan foretages fra oversigten over indstillinger – mere herom på side 21.

Når De har tilvalgt enten en ledelinje eller afblændings-"gardinerne", kan De justere ledelinjens placering på skærmen, eller bredden af mellemrummet mellem "gardinerne". Dette gøres ved at trykke hjem-knappen (den med huset øverst til venstre på apparates

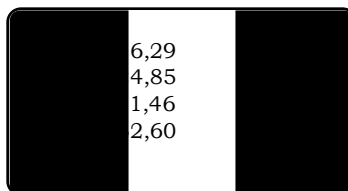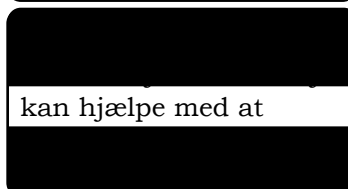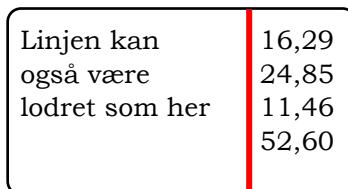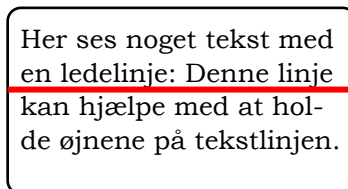

forside; nr. 2 i oversigten på side 4), og **holde den nede** mens De trykker på en af knapperne til justering af forstørrelsen (nr. 5 og 6 i oversigten på side 4).

Galleri og indstillinger

En række af Luna 6's særlige funktioner kaldes frem ved at trykke på hjem-knappen (den med huset, som sidder øverst til venstre på apparatets forside; nr. 2 i oversigten på side 4): Når man gør dette, ser skærmen ud som illustreret til højre.

Øverst ses en række af otte symboler, der illustrerer forskellige funktioner man kan kalde frem; ét af dem er fremhævet med en gul farve, og gengivet i stor størrelse midt på skærmen. I siderne af skærmen ses nogle symboler ud for hver af knapperne på apparatets forside, som skal hjælpe med at huske hvad hver knap gør, når dette skærbillede vises.

Kommer De til at trykke på hjem-knappen ved et uheld, så dette skærbillede utilsigtet dukker op, kan De "slippe ud" af det igen ved blot at trykke på hjem-knappen igen.

Ved hjælp af knapperne der øger og mindsker forstørrelsen (dem med plus- og minus-tegnene til højre for skærmen; nr. 5 og 6 i oversigten på side 4) kan De flytte den gule fremhævelse frem og tilbage mellem de otte symboler. Når symbolet for den funktion De ønsker at benytte, er fremhævet med gult, kan de "bekræfte" Deres valg ved at trykke på farvetilstandsknappen nederst til venstre på apparatets forside (nr. 3 i oversigten på side 4).





Tabellen herunder giver en oversigt over hvad hver af de otte symboler dækker over:

Symbol	Beskrivelse	Læs mere på side
	Billedgalleri: Her findes de billeder De har "fastfrosset" og gemt som beskrevet på side 12.	16
	Mulighed for at tænde og slukke for de to små "læse-lys" der findes på bagsiden af Luna 6 (nr. 11 i oversigten på side 4).	17
	Tænd eller sluk for de bip-lyde som Luna 6 siger i visse situationer.	18
	Justering af skærmens lysstyrke.	18
	Finjustering af den kontrastforstærkende funktion (mere om denne på side 10).	19
	Mulighed for at vælge hvilke farvekombinationer der skal være tilgængelige, når De benytter kontrastforstærkning.	20
	Ledelinjer og afblænding, som kan hjælpe med læsning hvis Deres øjne har svært ved at blive på en tekstlinje.	21
	Giver adgang til forskellige indstillinger af teknisk karakter.	23

Billedgalleri

For at se de billeder De har ”fastfrosset” og gemt som beskrevet på side 12, skal De først trykke på hjem-knappen (den med huset øverst til venstre på apparatets forside; nr. 2 i oversigten på side 4). Hvis det første symbol i rækken (det forestiller et bjerglandskab med en sol over; se illustrationen til højre) ikke er fremhævet med gul farve, så brug knapperne til justering af forstørrelsen (dem til højre for skærmen med plus- og minus-tegn; nr. 5 og 6 i oversigten på side 4) til at flytte den gule fremhævelse hen til dette symbol, og tryk derefter på farvetilstandsknappen nederst til venstre på apparatets forside (nr. 3 i oversigten på side 4).

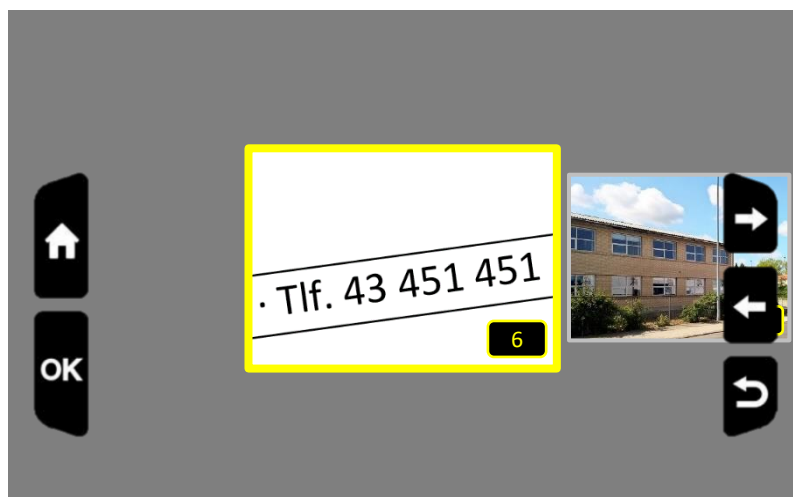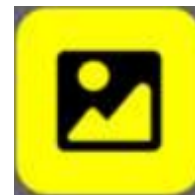

Billedgalleriet ser ud som på illustrationen til venstre: De enkelte billeder vises som miniaturer, nummereret i den orden De har gemt dem, men med det nyeste billede længst til venstre. I kanten af skærmen ses symboler, der skal minde om hvad knapperne på apparatet bruges til når De har galleriet fremme.

Nu kan De bruge knapperne til justering af forstørrelse (dem med plus- og minus-tegnene til højre for skærmen; nr. 5 og 6 i oversigten på side 4) til at ”bladre” mellem billederne.

For at se et billede i fuld størrelse, skal De først ”bladre” i billederne, så miniaturen af det billede De ønsker at se, optræder i midten af skærmen. Tryk derefter på kontrastforstærknings-knappen nederst til venstre (nr. 3 i oversigten på side 4) for at bekræfte Deres valg.

Når et billede fra galleriet vises i fuld størrelse, kan De forstørre det yderligere ved hjælp af knappen med plus-tegnet (nr. 5 i oversigten på side 4), og benytte kontrastforstærkning som beskrevet på side 10.

Luna 6 kan gemme på adskillige hundrede billeder, man ikke *ubegrænset* mange billeder; af den grund er det en god idé at slette gemte billeder, De ikke længere skal bruge. Dette gøres ved først at vælge et billede som beskrevet ovenfor, så det vises i fuld størrelse, og derefter trykke samtidigt på fastfrysingsknappen og knappen der mindsker forstørrelsen (hhv. den med fotografiapparatet og minus-tegnet til højre for skærmen; nr. 6 og 7 i oversigten på side 4). Når De gør dette, vises kortvarigt et lille symbol der forestiller en skraldespand (se illustrationen til højre), og kort efter vises det næste billede i rækken. Hvis det var det eneste billede i galleriet, vises kortvarigt teksten "No photo!", hvorefter skærmen vender tilbage til oversigten over funktioner (se side 14).



Tænde og slukke for læse-lys

Luna 6 har et par indbyggede lys (nr. 11 i oversigten på side 4), som belyser det man ser på gennem apparatet; dette er især nyttigt til læsning. Disse lys tændes automatisk, når De tænder for apparatet. Dog kan der være situationer, især i forbindelse med tekst på glittet papir eller andre blanke overflader, hvor dette lys generer mere end det gavner. Af den grund er der mulighed for at slukke disse lys.


For at gøre dette, skal De først trykke på hjem-knappen (den med huset øverst til venstre på apparatets forside; nr. 2 i oversigten på side 4), og derefter bruge forstørrelsesknapperne (dem med plus- og minus-tegnene til højre for skærmen; nr. 5 og 6 i oversigten på side 4) til at vælge det symbol, der forestiller en elpære (se illustrationen til højre), og bekræfte valget ved at trykke på kontrastforstærknings-knappen nederst til venstre for skærmen (nr. 3 i oversigten på side 4).



Nu kan De, ved hjælp af forstørrelses-knapperne, vælge mellem to symboler, der forestiller hhv. et par lysende elpærer, og et par overstregede elpærer. For at slukke lysene skal De sørge for, at de overstregede elpærer er fremhævet med gul farve – for at tænde lysene skal De tilsvarende vælge de lysende elpærer; bemærk at lysene tænder og slukker for at afspejle Deres valg. Bekræft til sidst Deres valg ved at trykke på kontrastforstærknings-knappen nederst til venstre for skærmen (nr. 3 i oversigten på side 4).

Tænde og slukke for bip-lyde


Luna 6 er fra fabrikken indstillet til at give nogle bip-lyde i bestemte situationer, men dette kan vælges til eller fra efter behag. For at gøre dette, skal De først trykke på hjem-knappen (den med huset øverst til venstre på apparatets forside; nr. 2 i oversigten på side 4), og derefter bruge forstørrelsesknapperne (dem med plus- og minus-tegnene til højre for skærmen; nr. 5 og 6 i oversigten på side 4) til at vælge det symbol, der forestiller en højttaler med lydbølger (se illustrationen til højre), og bekræfte valget ved at trykke på kontrastforstærkningsknappen nederst til venstre for skærmen (nr. 3 i oversigten på side 4).

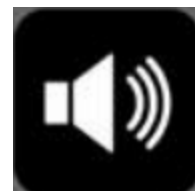


Nu vises et skærbillede med to højttaler-symboler; det ene med lydbølger, og det andet med et kryds: Brug forstørrelsesknapperne til at flytte den gule fremhævelse til enten højttaleren med lydbølgerne for at vælge bip-lydene til, eller til højttaleren med krydset for at vælge bip-lydene fra. Bekræft til sidst Deres valg ved at trykke på kontrastforstærkningsknappen.

Justere skærmens lysstyrke

De kan justere lysstyrken i Luna 6's indbyggede skærm, så den passer til belysningsforholdene der hvor De bruger apparatet. For at gøre dette, skal De først trykke på hjem-knappen (den med huset øverst til venstre på apparatets forside; nr. 2 i oversigten på side 4), og derefter bruge forstørrelsesknapperne (dem med plus- og minus-tegnene til højre for skærmen; nr. 5 og 6 i oversigten på side 4) til at vælge det symbol, der forestiller en sol (se illustrationen til højre), og bekræfte valget ved at trykke på kontrastforstærkningsknappen nederst til venstre for skærmen (nr. 3 i oversigten på side 4).

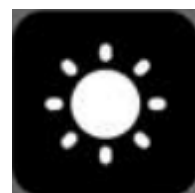

Nu ses et skærbillede som det der er vist på illustrationen til højre (baggrunden, som her ligner træ vil vise det levende billede). De fem felter i bunden fungerer som en "skala"; når De trykker på forstørrelsesknapperne (dem med plus- og minus-tegnene til højre for skærmen; nr. 5 og 6 i oversigten på side 4), kan De justere hvor lys skærmen er; jo flere af

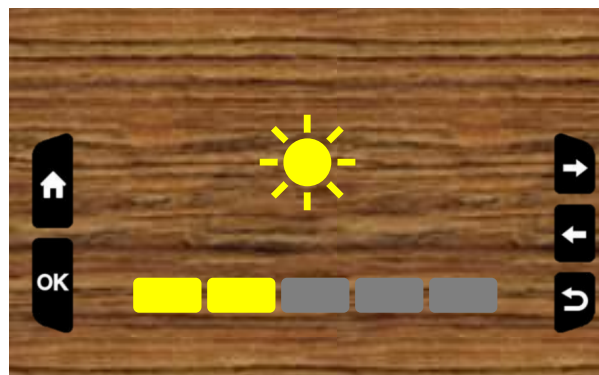


felterne der er gule, desto stærkere er lyset i skærmen. Når skærmen har en passende lysstyrke, skal De bekræfte valget ved at trykke på kontrastforstærknings-knappen nederst til venstre for skærmen (nr. 3 i oversigten på side 4).

Justering af kontrastforstærkning

Når De bruger kontrastforstærkning (mere herom på side 10), kan De undertiden komme ud for, at den tekst etc. De ser på slet ikke kan ses på skærmen; dette sker typisk ved dårlige belysningsforhold, eller hvis teksten på papiret har en dårlig kontrast mellem tekst og baggrund. Dette problem kan afhjælpes ved at justere "grænsen" mellem hvad der skal opfattes som tekst, og hvad der er baggrund.

Bemærk: Inden De bruger denne funktion, skal De sørge for at kontrastforstærkning er valgt til, og at De har noget tekst eller lignende De kan se på gennem Luna 6.

Tryk først på hjem-knappen (den med huset øverst til venstre på apparatets forside; nr. 2 i oversigten på side 4), og brug derefter forstørrelsesknapperne (dem med plus- og minus-tegnene til højre for skærmen; nr. 5 og 6 i oversigten på side 4) til at vælge det symbol, der forestiller to A'er (illustreret til højre), og bekræfte valget ved at trykke på kontrastforstærknings-knappen nederst til venstre for skærmen (nr. 3 i oversigten på side 4).

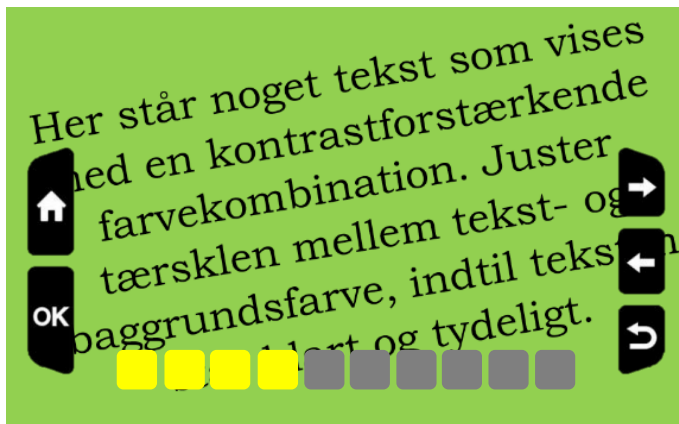

Nu vises et billede på skærmen omtrent som vist på illustrationen til venstre. Baggrunden vil vise det "levende billede" med den kontrastforstærkning De har valgt, og i bunden ses en "skala" af ti felter, hvoraf nogle er gule og resten grå. Ved hjælp af knapperne til forstørrelse (dem med plus- og minus-tegnene) kan De justere på denne skala. Gør dette

med Luna 6 anbragt på noget tekst, indtil teksten står klart og tydeligt på skærmen.



Bemærk at der er en "genvej" til denne justering, så De ikke behøver gå via oversigten over indstillinger: Når De bruger kontrastforstærkning, kan De trykke kontrastforstærkningsknappen ind, og **hold den inde** mens De trykker en eller flere gange efter tur på knapperne der øger og mindsker forstørrelsen (dem med plus- og minus-tegnene til

højre for skærmen; nr. 5 og 6 i oversigten på side 4), indtil teksten står tilfredsstillende klart på skærmen.

Tilpasning af farvekombinationer ved kontrastforstærkning

Fra fabrikken er Luna 6 indstillet til at "tilbyde" alle 10 tilgængelige farvekombinationer, når man slår kontrastforstærkning til. Ulempen ved dette er, at man ofte skal trykke adskillige gange på kontrastforstærknings-knappen, for at "bladere" hen til den farvekombination man vil bruge. Hvis De efter nogen tids brug finder ud af hvilke farvekombinationer der hjælper Dem bedst, kan De begrænse "sortimentet" til disse kombinationer.

Tryk først på hjem-knappen (den med huset øverst til venstre på apparatets forside; nr. 2 i oversigten på side 4), og brug derefter forstørrelsesknapperne (dem med plus- og minus-tegnene til højre for skærmen; nr. 5 og 6 i oversigten på side 4) til at vælge det symbol, der forestiller en halvt udfyldt cirkel (illustreret til højre), og bekræfte valget ved at trykke på kontrastforstærknings-knapen nederst til venstre for skærmen (nr. 3 i oversigten på side 4).

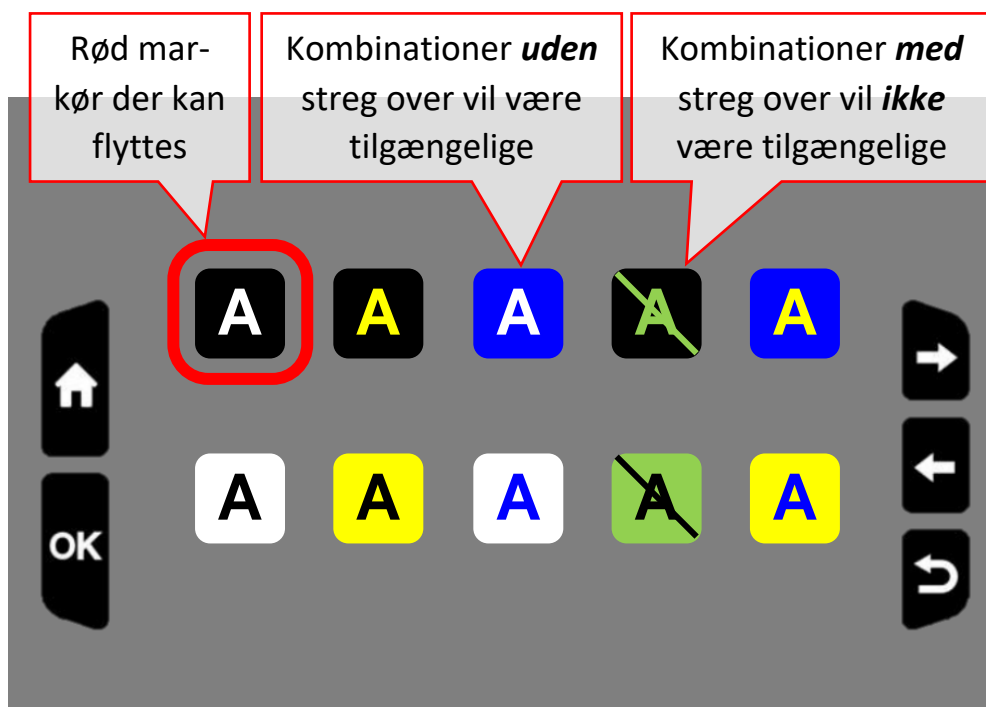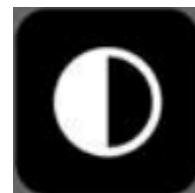

Nu vises en oversigt over alle ti farvekombinationer, som illustreret til venstre: A'et ses i tekstfarven, på et firkantet felt med baggrundsfarven. Én af farvekombinationerne er omkranset af en rød markør, som kan flyttes mellem farvekombinationerne ved hjælp af forstørrelses-



knapperne (dem med plus- og minus-tegn).

Når man trykker på kontrastforstærkningsknappen nederst til venstre på apparatets forside (nr. 3 i oversigten på side 4), vil den farvekombination som omkranses af den røde markør få en skrå streg over; i eksemplet på forrige side har de grønne kombinationer sådan en skrå streg. Hvis den valgte kombination allerede er streget over når De trykker på kontrastforstærknings-knappen, fjernes overstregningen.

Sørg på denne måde for, at de farvekombinationer De **ikke** ønsker at benytte, er streget over, mens de kombinationer De gerne vil have til rådighed, **ikke** er overstreget. Når De har valgt hvilke kombinationer der skal være tilgængelige, så tryk på hjem-knappen øverst til venstre på apparatets forside for at afslutte indstillingen. Fremover vil det kun være de farvekombinationer De **ikke** har "overstreget" i oversigten, der kan vælges ved at trykke på kontrastforstærknings-knappen.

Ledelinjer og afblændingsgardiner

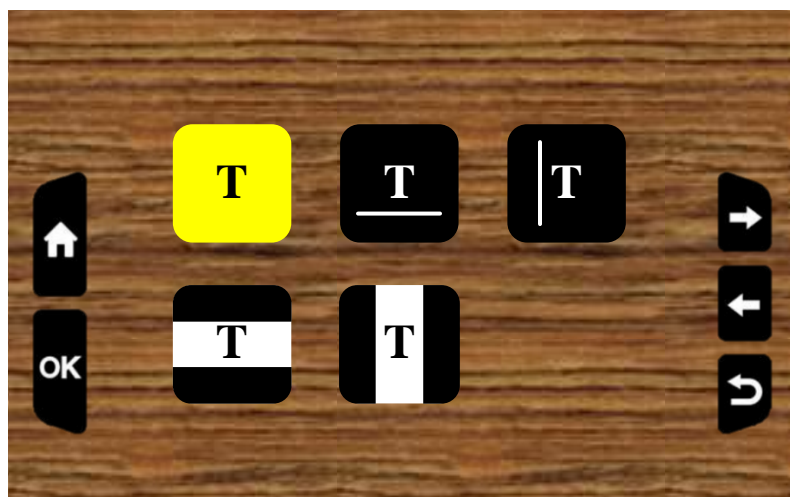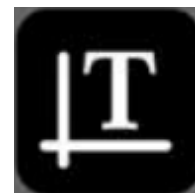


De på side 13 omtalte ledelinjer og afblændings-"gardiner" kan også vælges fra oversigten over indstillinger. Tryk først på hjem-knappen (den med huset øverst til venstre på apparatets forside; nr. 2 i oversigten på side 4), og brug derefter forstørrelsesknapperne (dem med plus- og minus-tegnene til højre for skærmen; nr. 5 og 6 i oversigten på side 4) til at vælge det symbol, der forestiller bogstavet "T" sammen med nogle streger (illustreret til højre), og bekræfte valget ved at trykke på kontrastforstærknings-knappen nederst til venstre for skærmen (nr. 3 i oversigten på side 4).



Dette vil fremkalde en oversigt over de forskellige valgmuligheder som illustreret til venstre – bemærk at baggrunden (som her forestiller træ) vil være billedet af det der er under/bag Luna 6.

Én af valgmulighederne vil være fremhævet med gul farve: Ved at trykke på forstørrelsesknapperne (dem med plus- og minus-tegn-

ene til højre for skærmen; nr. 5 og 6 i oversigten på side 4) kan De flytte denne gule fremhævnning hen til det symbol, der svarer til den indstilling De ønsker at benytte:

	<p>Vælg dette symbol for helt at fravælge ledelinjer og afblændings-”gardiner”.</p>
	<p>Vælg dette symbol for at få en vandret, rød ledelinje (parallelt med skærmens længderetning).</p>
	<p>Vælg dette symbol for at få en lodret, rød ledelinje (på tværs af skærmens længderetning).</p>
	<p>Vælg dette symbol for at få afblændings-”gardiner” som efterlader en smal stribe af billedet parallelt med skærmens længderetning.</p>
	<p>Vælg dette symbol for at få afblændings-”gardiner” som efterlader en smal stribe af billedet på tværs af skærmens længderetning.</p>

Bemærk at De også kan til- og fravælge ledelinjer og gardiner uden at bruge oversigten over indstillinger, dvs. mens De bruger Luna 6 til at se/læse med: Tryk **samtidigt** på de to knapper til justering af forstørrelsen (dem med plus- og minus-tegnene til højre for skærmen; nr. 5 og 6 i oversigten på side 4) en eller flere gange, indtil den ønskede type af ledelinje eller afblændings-”gardiner” ses på skærmen.

På side 13 kan De også læse om, hvordan De kan justere placeringen af en ledelinje, eller bredden på mellemrummet mellem afblændings-”gardinerne”.


Tekniske indstillinger






Det sidste symbol i oversigten over indstillinger dækker over forskellige indstillinger af teknisk art: Når De vælger dette, vises en ny oversigt som illustreret til højre.

Denne oversigt virker på samme måde som den generelle oversigt over indstillinger og galleri:

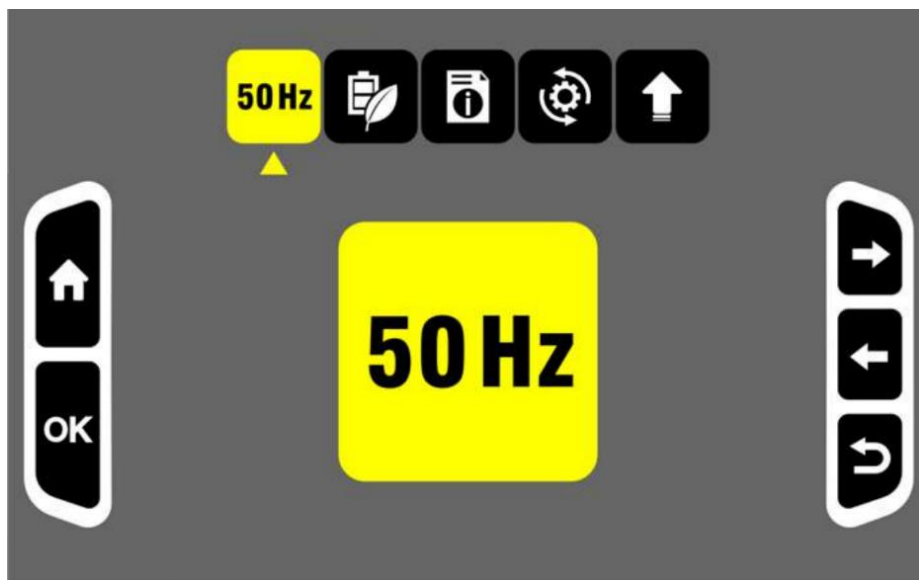Ved at trykke på de to

knapper til justering af forstørrelsen (dem med plus- og minus-tegnene til højre for skærmen; nr. 5 og 6 i oversigten på side 4) kan De flytte den gule fremhævelse mellem de fem symboler i toppen af skærbilledet, og det aktuelt valgte symbol er gengivet i stor størrelse midt på skærmen. Når det ønskede symbol er valgt, skal De bekræfte valget ved at trykke på farvetilstands-knappen nederst til venstre for skærmen (nr. 3 i oversigten på side 4). De kan også trykke på Hjem-knappen (den med huset øverst til venstre for skærmen; nr. 2 i oversigten på side 4) for at komme ud af oversigten over indstillinger og direkte tilbage til det "levende" billede, eller på fastfrysingsknappen nederst til højre for skærmen (nr. 7 i oversigten på side 4) for at vende tilbage til oversigten over de mere generelle indstillinger.


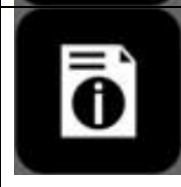


	<p>Dette symbol handler om at indstille hvor hurtigt kameraet arbejder. Dette kan i nogle tilfælde afhjælpe problemer med flimren eller blinken på Luna 6's skærm.</p>
	<p>Dette symbol handler om at slå den funktion til eller fra, som automatisk slukker for Luna 6 hvis De efterlader apparatet tændt i mere end tre minutter uden at bruge det.</p>
	<p>Dette symbol kalder nogle tekniske oplysninger frem om Luna 6, som kan være nyttige hvis De kontakter os for at få hjælp til løse et problem med apparatet. De får ikke brug for denne funktion i Deres daglige brug af Luna 6.</p>
	<p>Dette symbol handler om en funktion, som stiller alle de ting der kan indstilles på Luna 6 tilbage til den måde de var, da apparatet blev sendt afsted fra fabrikken.</p>
	<p>Dette symbol handler om noget meget teknisk (for kendere: opdatering af firmwaren i apparatet). Det får De heller aldrig brug for i Deres daglige brug af Luna 6.</p>

Kameraets arbejds hastighed og afhjælpning af "flimmer" på skærmen

Visse typer belysning kan give anledning til generende flimren eller blinken på skærmen på Luna 6. Hvis De oplever dette, så prøv at bruge denne funktion; den kan somme tider afhjælpe problemet.

Kald først oversigten over generelle indstillinger frem ved at trykke på hjem-knappen (den med huset øverst til venstre på forsiden af Luna 6; nr. 2 i oversigten på side 4). Brug derefter knapperne til justering af forstørrelsen (dem med plus- og minus-tegnene til højre for skærmen; nr. 5 og 6 i oversigten på side 4) til at flytte den gule fremhævningsmarkering hen til symbolet, der forestiller et tandhjul (illustreret til højre), og bekræft valget ved at trykke på kontrastforstærkningsknappen nederst til venstre for skærmen (nr. 3 i oversigten på side 4). Dette kalder oversigten over tekniske indstillinger frem, hvor funktionen til indstilling af kameraets arbejds hastighed (der hvor der står enten "50 Hz" eller "60 Hz") allerede er fremhævet med gul farve – bekræft dette valg med endnu et tryk på kontrastforstærkningsknappen.

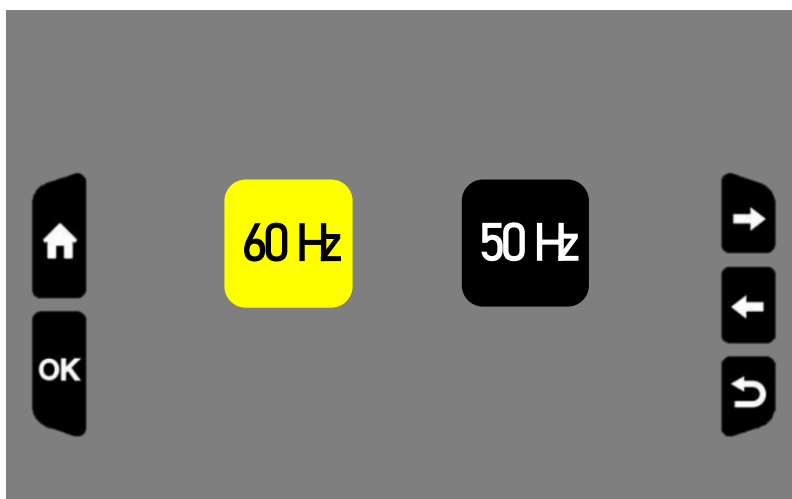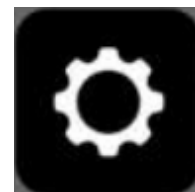



Nu ses et skærmbillede som det der er illustreret til venstre, med to felter mærket henholdsvis "60 Hz" og "50 Hz". Ved hjælp af forstørrelsesknapperne (dem med plus- og minus-symbolerne) kan De flytte den gule fremhævningsmarkering mellem de to felter.

Hvis De oplever flimmer eller blinken når "60 Hz" er valgt, så skift over til "50 Hz". Oplever De flimmer/blinken mens "50 Hz" er valgt, så skift til "60 Hz". Bekræft Deres valg ved at trykke på knappen til kontrastforstærkning nederst til venstre for skærmen (nr. 3 i oversigten på side 4).

Vælge automatisk sluk til eller fra

Som tidligere omtalt er Luna 6 fra fabrikken indstillet til at slukke automatisk, hvis De efterlader det tændt uden at bruge det i mere end tre minutter i træk. Finder De dette generende, kan De slå denne funktion fra, så Luna 6 forbliver tændt, indtil De selv slukker for den.


For at gøre dette, skal De først kalde oversigten over generelle indstillinger frem ved at trykke på hjem-knappen (den med huset øverst til venstre på forsiden af Luna 6; nr. 2 i oversigten på side 4). Brug derefter knapperne til justering af forstørrelsen (dem med plus- og minus-tegnene til højre for skærmen; nr. 5 og 6 i oversigten på side 4) til at flytte den gule fremhævningsramme hen til symbolet, der forestiller et tandhjul (illustreret til højre), og bekræft valget ved at trykke på kontrastforstærkningsknappen nederst til venstre for skærmen (nr. 3 i oversigten på side 4). Dette kalder oversigten over tekniske indstillinger frem: Brug igen forstørrelses-knapperne til at vælge det symbol, der forestiller et batteri og et blad fra en plante (illustreret til højre).

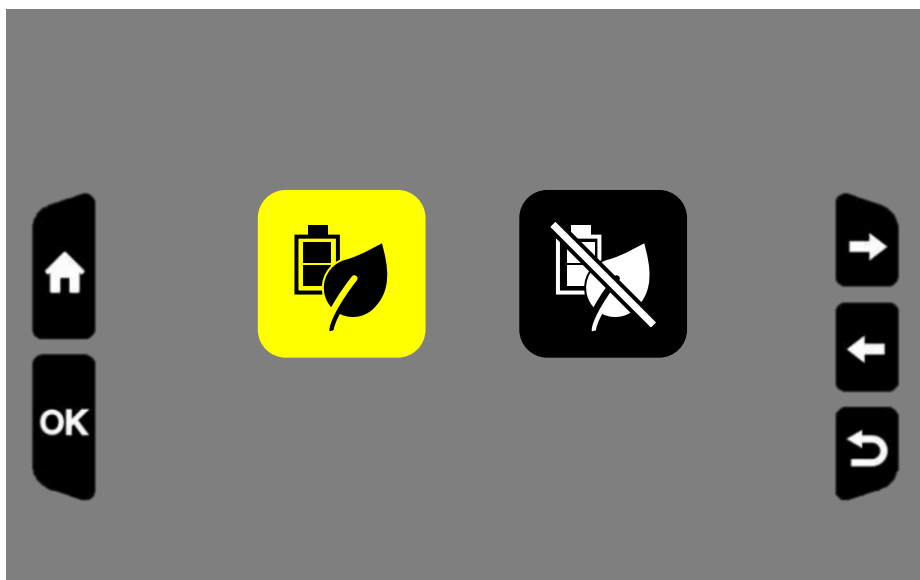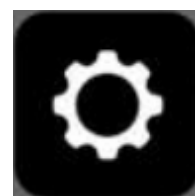

Nu vises et skærbillede som det der er illustreret til venstre: Ved hjælp af knapperne til justering af forstørrelsen (dem med plus- og minus-tegnene til højre for skærmen) kan De flytte den gule fremhævningsramme mellem to symboler. Vælg det, der svarer til

den ønskede indstilling:

Symbolet til venstre har **ikke** en diagonal streg over sig: Vælg dette, hvis Luna 6 skal **slukke af sig selv**, hvis De efterlader apparatet tændt i mere end tre minutter.

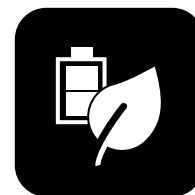

Symbolet til højre **har** en diagonal streg foran batteriet og bladet. Vælg dette, hvis Luna 6 skal **forblive tændt**, selv om De ikke bruger det i tre minutter i træk.



Når De har valgt det ønskede symbol, skal De bekræfte valget ved at trykke på farvetilstands-knappen nederst til venstre for skærmen (nr. 3 i oversigten på side 4). De kan også trykke på Hjem-knappen (den med huset øverst til venstre for skærmen; nr. 2 i oversigten på side 4) for at komme ud af oversigten over indstillinger og tilbage til det "levende" billede, eller på fastfrysingsknappen nederst til højre for skærmen (nr. 7 i oversigten på side 4) for at vende tilbage til oversigten over de mere generelle indstillinger.

Bemærk, at når Luna 6 er indstillet til **ikke** at slukke af sig selv, vil apparatet forblive tændt indtil De enten selv slukker apparatet, eller når batteriet eventuelt løber tør for strøm.

Information om firmware-version



Denne funktion er mest henvendt til den service-tekniker, der eventuelt skal afhjælpe et problem med Deres Luna 6. Hvis De kalder den frem, vises en teknisk talkode på skærmen – for at komme ud af dette skærbillede skal De blot trykke på fastfrysingsknappen (den med fotografiapparatet nederst til højre for skærmen; nr. 7 i oversigten på side 4)

Nulstilling til fabriksindstillinger

Denne funktion ændrer alle de ting der kan indstilles på Luna 6, så de har den indstilling de kom med fra fabrikken – dette kan være en nyttig ”nødløsning”, hvis De har ændret en eller flere indstillinger, som får apparatet til at opføre sig mærkeligt eller uhensigtsmæssigt.

Advarsel: Denne nulstilling sletter også alle De billeder De eventuelt har ”fastfrosset” og gemt i Luna 6’s galleri (mere herom på side 12), de farvkombinationer der har valgt til eller fra (som beskrevet på side 20), og alle andre indstillinger og ændringer, De selv har foretaget.

For at gøre dette, skal De først kalde oversigten over generelle indstillinger frem ved at trykke på hjem-knappen (den med huset øverst til venstre på forsiden af Luna 6; nr. 2 i oversigten på side 4). Brug derefter knapperne til justering af forstørrelsen (dem med plus- og minus-tegnene til højre for skærmen; nr. 5 og 6 i oversigten på side 4) til at flytte den gule fremhævelse hen til symbolet, der forestiller et tandhjul (illustreret til højre), og bekræft valget ved at trykke på kontrastforstærkningsknappen nederst til venstre for skærmen (nr. 3 i oversigten på side 4). Dette kalder oversigten over tekniske indstillinger frem: Brug igen forstørrelses-knapperne til at vælge det symbol, der forestiller et tandhjul omgivet af et par pile (illustreret til højre).

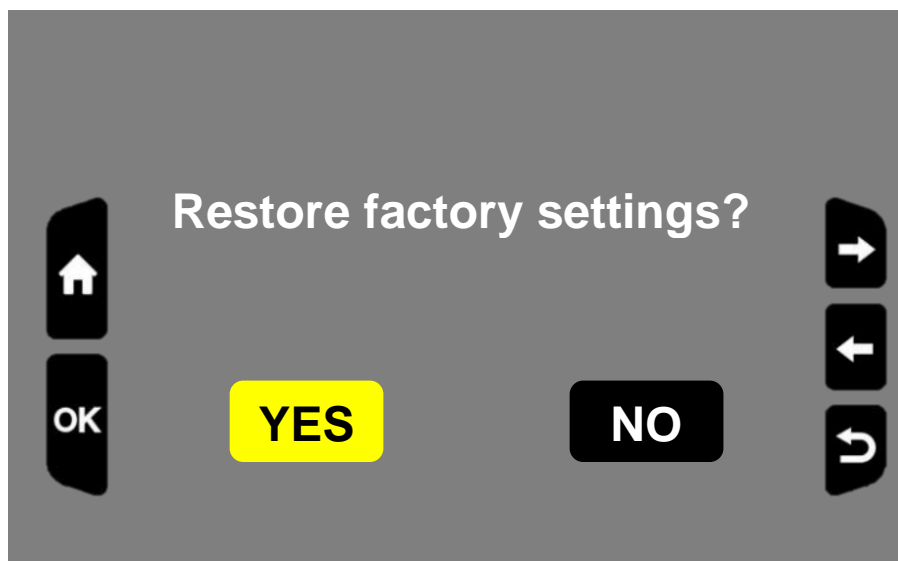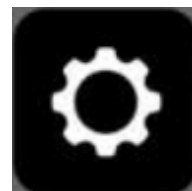

Nu vises et skærmbillede som det der er illustreret til venstre: Her skal De bekræfte en ekstra gang, at De vitterligt ønsker at gennemføre nulstillingen: Brug knapperne til forstørrelse (dem med plus- og minus-tegnene til højre for skærmen) til at flytte den gule fremhævelse til enten ”YES” (for ”ja”) eller

”NO” (for nej), og tryk så på kontrastforstærknings-knappen for at bekræfte Deres ”svar”.

Hvis ”YES” (for ”ja”) er fremhævet med gult når De bekræfter svaret med kontrastforstærkningsknappen, går der nogle sekunder, hvorefter Luna 6 slukker. Når De tænder for apparatet igen, er alle ting stillet tilbage til hvad de var fra fabrikkens side, og galleriet med gemte, ”fastfrosne” billeder vil være tømt.

Vælger De ”NO” (”nej”) og trykker på kontrastforstærkningsknappen, vender skærmen tilbage til oversigten med tekniske indstillinger.

Firmware-opdatering


Denne sidste valgmulighed i oversigten over tekniske indstillinger er mest henvendt til den service-tekniker, der eventuelt skal afhjælpe et problem med Deres Luna 6. De får aldrig brug for at kalde den frem i Deres daglige brug af Luna 6. Hvis De kalder den frem, vises kortvarigt teksten ”No Firmware”, hvorefter skærmen igen viser oversigten over tekniske indstillinger.

Tilslutning til ekstern skærm eller tv-apparat


De kan forbinde Luna 6 til en ekstern skærm, for eksempel et almindeligt tv-apparat, og få billedet vist her i stedet for apparatets indbyggede skærm: Da sådanne skærme/tv-apparater typisk er noget større end den indbyggede skærm, kan De på den måde opnå langt kraftigere forstørrelse.

Til dette skal De bruge det medfølgende HDMI-kabel (mærket ”I” i oversigten på side 3). Dette kabel har et stort og et lille stik.

Sæt det lille stik i hullet til højre på apparatets øverste kant (nr. 9 i oversigten på side 4), og det store stik i HDMI-stikhullet på det tv-apparat eller skærm De ønsker at anvende, som illustreret herunder – bemærk at **begge stik skal vende rigtigt** for at kunne komme på plads i stikhullerne.

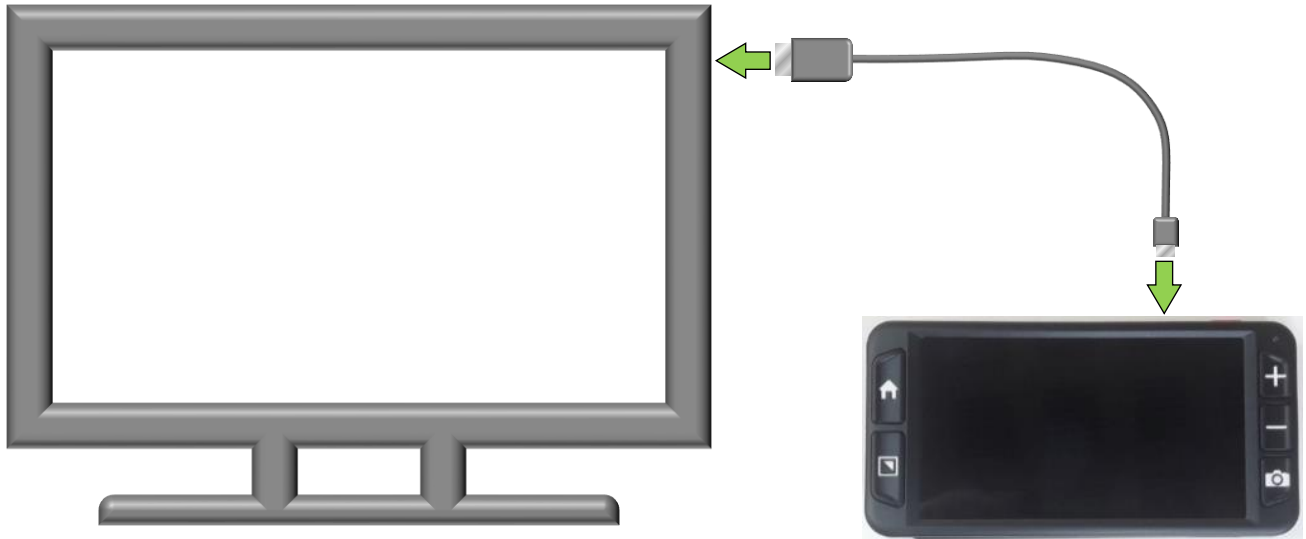

Sørg for at der er tændt for både Luna 6 og tv-apparatet/skærmen. Ofte vil det være nødvendigt at "fortælle" tv-apparatet/skærmen, at den skal vise billedet fra Luna 6. Se efter en knap på tv-apparatet/skærmen eller eventuelt den tilhørende fjernbetjening mærket "Input", "Aux" eller et symbol lignende det der er illustreret til højre. I tvivlstilfælde henvises til vejledningen til tv-apparatet eller skærmen.

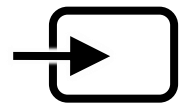


Bemærk at Luna 6 viser et billede **enten** på den indbyggede skærm, **eller** det tilsluttede tv-apparat eller skærm. Når billedet fra Luna 6 vises på et tilsluttet tv eller skærm, er skærmen på selve apparatet slukket, dvs. helt sort.

Tilslutning til en Windows-computer

De kan forbinde Luna 6 til en computer med Windows-operativsystemet, og på den måde overføre billeder De har "fastfrosset" og gemt i apparatets indbyggede "billedgalleri" som beskrevet på side 12, til computeren: Det giver mulighed for at sende billedet pr. e-mail, eller bruge det på f.eks. sociale medier.

For at gøre dette, skal De først sikre at både Luna 6 og computeren er tændt og klar til brug. Anvend det USB-C-kabel (mærket "C" i oversigten på side 3) som også bruges til opladning, til at forbinde de to apparater. Dette kabel har et stort og et lille stik, hvoraf det lille passer i hullet til venstre langs overkanten af Luna 6 (nr. 8 i oversigten på side 4), mens det store passer i et standard USB-stikhul på Deres computer. Bemærk at det store stik i modsætning til det lille skal vende den rigtige vej for at passe ind i stikhullet.

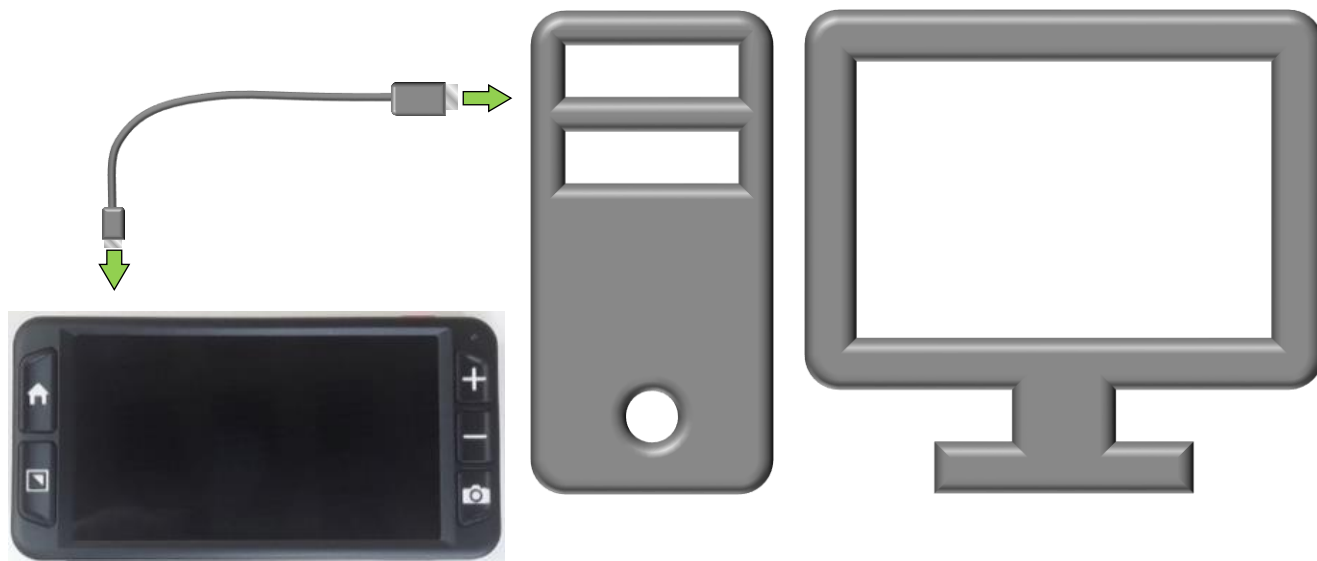

Når De gør dette, vil Deres Luna 6 optræde i Windows Stifinder-programmet som "USB-drev": I dette drev findes en mappe, kaldet "DCIM", som indeholder billederne fra galleriet. Disse billeder har navne som "num_000000000001", "num_000000000002" osv.; tallene svarer til de numre, som billederne har når man finder dem frem i Luna 6's indbyggede billedgalleri. Herfra kan De kopiere eller flytte billederne til andre mapper og drev på Deres computer til senere brug.

Bemærk, at når Luna 6 er sluttet til en computer på denne måde, leverer computeren strøm til Luna 6, som derved oplades.

Afhjælpning af fejl og problemer

Hvis De oplever problemer med Deres Luna 6, giver dette kapitel forslag til hvordan De kan afhjælpe fejlen.

Sort skærm

Kontroller om Luna 6 er tændt. Kan De ikke tænde for den, trænger den muligvis til at blive ladet op – mere herom på side 6.

Prøv også at skrue ned for forstørrelsen ved at trykke på knappen med minus-tegnet på apparatets forside (nr. 5 i oversigten på side 4).

Hvis Luna 6 er sluttet til et eksternt tv-apparat eller en skærm (mere herom på side 29), vises billedet dér i stedet for på den indbyggede skærm. Tag HDMI-stikket ud, og sluk og tænd derefter for Luna 6.

Skærmen viser et mørkt, uskarpt eller forvrænget billede

Kontroller at apparatet står fladt på det læsestof etc. De prøver at se. Er de to læse-lys på bagsiden slukket, så tænd for dem – mere om hvordan dette gøres på side 17.

De kan også skrue op for skærmens lysstyrke; dette er beskrevet på side 18.

Luna 6 er sluttet til et tv eller anden ekstern skærm, men tv'et/skærmen viser intet billede

Kontroller at

- Der er tændt for tv-apparatet/skærmen.
- Tv-apparatet/skærmen er indstillet til at vise billedet fra en ekstern kilde, i dette tilfælde Luna 6. Se i vejledningen til det benyttede tv-apparat eller skærm, hvordan dette gøres.
- HDMI-kablet er sat korrekt i både tv-apparatet/skærmen og i Luna 6.

Læs mere om tilslutning af tv-apparat eller skærm på side 29.

Efter at have foretaget nogle indstillinger, synes Luna 6 at ”opføre” sig mærkeligt

Hvis De har ændret i nogle af de mange indstillinger der kan foretages i Luna 6, men synes at apparatet nu opfører sig mærkeligt, kan De stille alting tilbage som de var da apparatet forlod fabrikken; læs mere om dette på side 28. Bemærk dog at dette også sletter de fastfrosne billeder, De måtte have gemt i Luna 6's indbyggede galleri!

Luna 6 er tændt, men reagerer ikke (eller reagerer unormalt) når man betjener den

Tryk den røde tænd/sluk-knap til højre på apparatets overkant (nr. 10 i oversigten på side 4) ind, og **hold den inde** i 10 sekunder: Dette vil nulstille apparatet.

Ingen af ovenstående forslag hjalp – hvad gør man så?

Hvis intet af ovenstående har afhjulpet problemet, bedes De kontakte Lys og lup med henblik på reparation. Vores kontaktoplysninger er anført nederst på forsiden af denne vejledning.

Tekniske specifikationer

Forstørrelse	Fra 2½× til 19× forstørrelse
Skærm	5½ tommer, 1280×720 pixels
Kamera	13 megapixel, med autofokusering
Farvetilstande	Naturlige farver plus 10 forskellige farvekombinationer med forstærket kontrast
Vægt	Luna 6 vejer 210 gram Den trådløse oplader vejer 92 gram
Ydre dimensioner	16 × 8 × 1 cm
Batteriets drifttid	Over 4 timer på en fuld opladning
Tid til opladning af batteriet	Ved direkte tilslutning til lysnet-adapteren mindre end 3 timer. Ved opladning på den trådløse oplader cirka 4 timer.
Lysnet-adapter	Virker på fra 100 til 240 volt vekselspænding. Leverer 5 volt ved maksimalt 2½ ampere.