

Vejledning til

# Miniluplampe



Hent nyeste version af denne vejledning på adressen  
[lysoglup.dk/upload\\_dir/docs/Miniluplampe\\_dansk\\_vejledning.pdf](https://lysoglup.dk/upload_dir/docs/Miniluplampe_dansk_vejledning.pdf)  
eller scan QR-koden til venstre

Se videovejledningen til miniluplampen på adressen  
[youtu.be/pBJ6FXr02Fc](https://youtu.be/pBJ6FXr02Fc)  
eller scan QR-koden til højre



# Indholdsfortegnelse

Introduktion.....	1
Sikkerhed og vedligeholdelse .....	1
Indholdet i æsken .....	2
Rundt om miniluplampen .....	2
Opstilling og ibrugtagning .....	2
Tænde og slukke .....	3
Tilpasse lysets styrke.....	3
Tekniske specifikationer .....	3

## Introduktion

Tillykke med – og tak for – anskaffelsen af Deres miniluplampe. For at få det fulde udbytte, anbefales De at læse denne vejledning helt igennem.

## Sikkerhed og vedligeholdelse

- Brug kun den medfølgende lysnetadapter, der passer til lampen. Selv om andre adaptere kan have et stik, der passer i lampen, leverer de ikke nødvendigvis den rigtige "slags" strøm. Ved at bruge en forkert adapter risikeres skade på lampen, lysnetadapteren eller begge dele.
- **Undgå at sollys træffer lampens linse!** Denne kan fokusere lyset på brændbart materiale og **starte en brand**. Når lampen ikke er i brug, bør linsen dækkes med det medfølgende dæksel, eller lampen opbevares et sted, hvor sollyset ikke kan nå den.
- Undgå at se direkte ind i lyset: Det er stærkt, og kan blænde.
- Undgå at bøje den fleksible lampearm i for skarpe "knæk"; dette kan beskadige armen.
- Lampen er beregnet til brug i tørre omgivelser inden døre. Undgå at spilde vand eller andre væsker på den. Rengøring skal ske med en blød klud, evt. let fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
- Lyskilden er beregnet til at holde i hele lampens levetid, og kan ikke udskiftes. Undlad at skille lampen ad. Oplever De problemer med lampen, bedes De kontakte Lys og lup med henblik på reparation – vores kontaktoplysninger står nederst på forsiden af denne vejledning.


## Indholdet i æsken

Lampen leveres sammen med den tilhørende lysnetadapter, dæksel til linsen, samt fabrikantens egen vejledning.

## Rundt om miniluplampen


I det følgende opregnes alle de knapper, stik og andre ting der sidder rundt omkring på Deres miniluplampe, alle med et nummer. Når denne vejledning nævner en af detaljerne, henvises til numrene i denne oversigt:

1. Lampehoved
2. Betjeningsknap
3. Fleksibel lampearms
4. Klemme til fastspænding på kanten af en bordplade
5. Stik til strømforsyning (på bagsiden af klemmen)

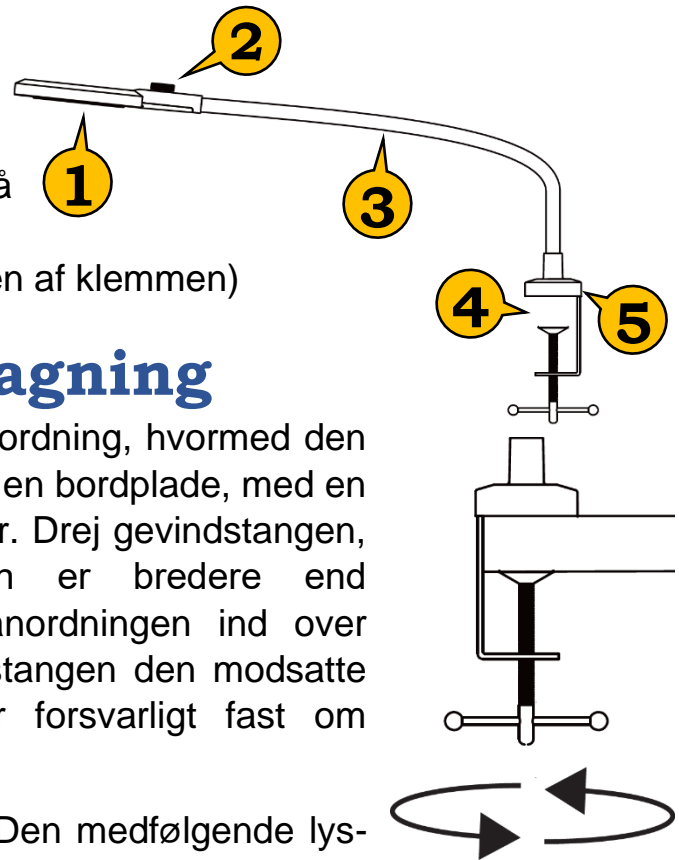

## Opstilling og ibrugtagning


Lampen er forsynet med en klemmeanordning, hvormed den kan fastspændes langs kanten af f.eks. en bordplade, med en maksimal tykkelse på godt 6 centimeter. Drej gevindstangen, indtil "gabet" i klemmeanordningen er bredere end bordpladens tykkelse, skyd klemmeanordningen ind over kanten af bordpladen, og drej gevindstangen den modsatte vej, indtil klemmeanordningen sidder forsvarligt fast om kanten.

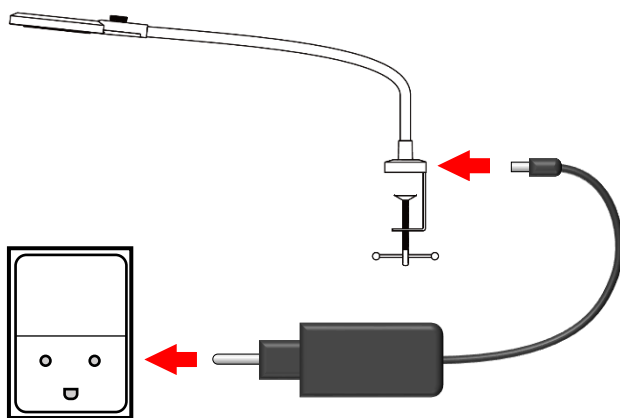

Den medfølgende lysnetadapter har en ledning, som ender i et rundt stik: Dette stik sættes i det stikhul, som findes bag på klemmeanordningen – se illustrationen til venstre. Selve lysnetadapteren sættes i en ledig stikkontakt – husk at tænde for strømmen på kontakten.

## Tænde og slukke

På oversiden af lampehovedet findes en rund knap (nr. 2 i oversigten på side 2): Ved at **trykke** på denne knap kan man tænde og slukke lyset.

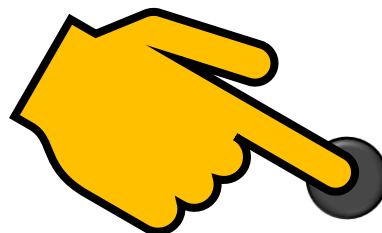

**Tryk på knappen for at tænde og slukke lyset.**


## Tilpasse lysets styrke

Knappen kan også drejes, omtrent som lydstyrke-knappen på en gammeldags radio (se illustrationen til højre):

**Drej knappen for at ændre lysstyrken:**

**Kraftigere lys**

**Svagere lys**

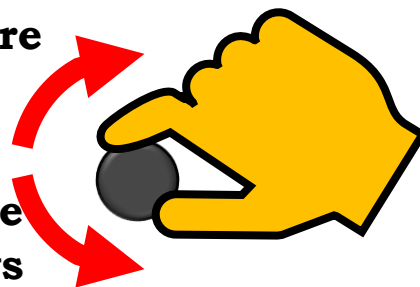

- Drej knappen **med** uret (eller "højre om") for at **øge** lysstyrken, eller
- drej knappen **mod** uret (eller "venstre om") for at **reducere** lysstyrken.

## Tekniske specifikationer

Elforbrug	Maks 10 W (ved højeste lysstyrke)
Farvetemperatur	6000 K (som dagslyset udenfor)
Farvegengivelse	$R_a \geq 95$
Linsens styrke	2¼ ganges forstørrelse, 5 dioptrier
Linsemål	85 mm i diameter