

Start af screencastning på EyesReality


Sæt først internet-routeren op – giv den gerne fem-ti minutter til at "vågne op" og blive klar.

Sæt strøm til tv'et, og giv det tid til at "boot'e op" – det ender med at vise noget med "HDMI 1 – Intet signal (tændt?)".

Start EyesReality-brillen og den tilhørende tablet op, og etabler forbindelsen mellem de to ("Set up the connection" og alt det der – du har gjort det før! 😊)

Åbn fronten af brillen, så du får adgang til telefonen inden i den. Swipe ind fra højre som vist på tegningen til højre: Så dukker de tre "kruseduller" op, der er vist til venstre: Tryk på "bollen" i midten.

○
||| Nu får du telefonens start-skærm frem. Swipe ind fra venstre ende som vist til højre – dette får telefonen til at vise et "meddelelses-center". Herfra kan man få fat i indstillinger ved at swipe ned fra overkanten af skærmen, som vist nedenfor til venstre.

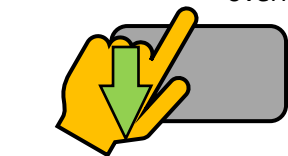

Indstillings-skærmen ligger "på siden" (fordi den forventer, at man holder telefonen lodret, men det gør brillen jo ikke). Find det punkt, der hedder "SmartView", og tryk på det.

Nu giver telefonen sig til at lede efter et apparat (f.eks. et tv), der kan "tage imod" billedet fra telefonen: Så snart navnet på det relevante apparat viser sig, så tryk på det.

Nu kommer der en dialogboks frem på mobilens skærm, hvor du skal vælge mellem at cast'e én bestemt app eller cast'e hele skærmen: Vælg "Cast entire screen", og tryk på den lille blå knap med "Cast screen" nederst til højre i feltet på skærmen.

Der går et øjeblik, indtil mobilens billede (startskærmen) vises på tv'et – tryk på det blå ikon med øjet, for at få EyesReality frem på mobilen igen.

Når EyesReality-app'en viser sine to "pudeformede" billeder på både mobilen og tv'et skærm, klapper du fronten af brillen sammen, og så er du klar til at demonstrere systemet! 😊

