



Kvikguide til i-See HD forstørrelses- apparat

Tryk for at vælge
stærk kontrast til/fra.
Drej for at skifte farve

Drej på denne knap
for at "skrue" op og
ned for
forstørrelsen

Drej på denne
knap for at
tilpasse skærmens
lysstyrke



Tænd og sluk her:



 **Bremse-håndtag til XY-bordet:**

Når det røde
håndtag er skub-
bet **til venstre**, er
XY-bordet helt
låst.



Når det røde håndtag står i
midten, kan XY-bordet kun
flyttes **til højre og venstre**.

Når det røde håndtag
er skubbet ud **til
højre**, kan XY-bordet
flyttes **både lodret
og vandret**