




Kvikguide til i-See HD forstørrelses- apparat

Tryk for at
vælge stærk
kontrast
til/fra.
Drej for at
skifte farve


Drej på denne
knap for at
"skrue" op og
ned for
forstørrelsen

Drej på
denne
knap for at
tilpasse
skærmens
lysstyrke

Tryk for
ledelinjer/af-
blændinger.
Drej for at
flytte linjen/
afblændingen

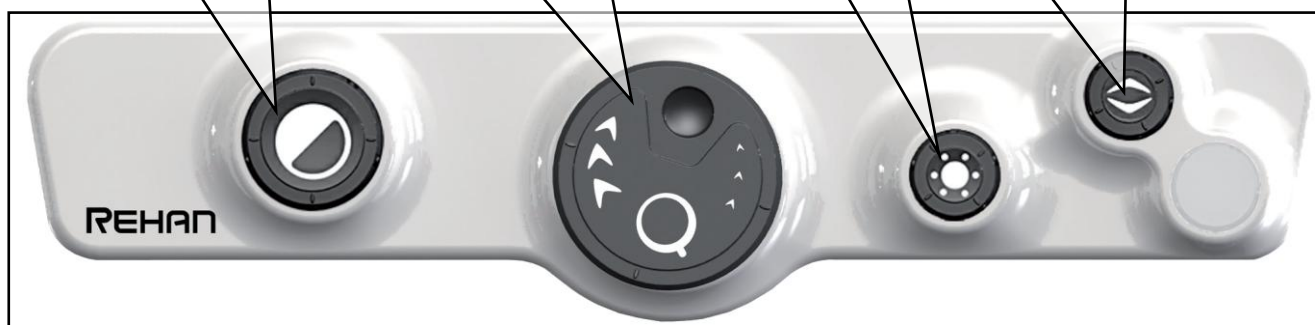

Tænd og sluk her:

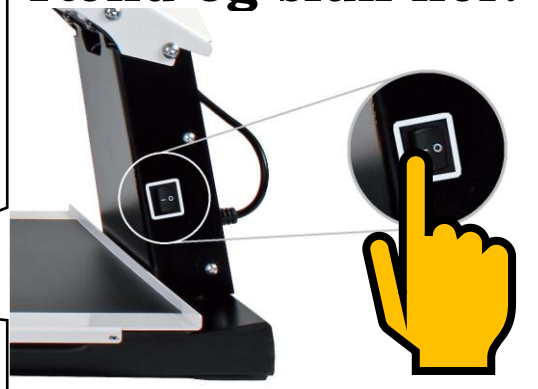

Bremse-håndtag til XY-bordet:

Når det røde
håndtag er skub-
bet **til venstre**, er
XY-bordet helt
låst.



Når det røde håndtag står i
midten, kan XY-bordet **kun**
flyttes **til højre og venstre**.

Når det røde håndtag
er skubbet ud **til**
højre, kan XY-bordet
flyttes **både lodret**
og **vandret**